

# Gebruiksaanwijzing Dietz Aruba

Scootmobiel

Aruba



**DIETZ**<sup>®</sup>  
REHA-PRODUKTE

Descostrasse 10  
D-76307 Karlsbad-Iltersbach  
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0  
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86

CE



Algemene informatie.

Wij danken u dat u gekozen heeft voor een scootmobiel van Dietz .

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de scooter gaat gebruiken

Conformiteitverklaring.

**Hierbij verklaart de firma Dietz dat op dit product de conformiteit EG richtlijn 93 / 42 voor medische producten geldt.**

**Voor wie**

De Dietz Aruba is geschikt voor binnen en buiten gebruik. De scooter is bedoeld voor het vervoeren van 1 persoon. De scooter is niet bedoeld voor het vervoeren van meerdere personen of goederen.

De scooter mag niet zwaarder belast worden dan 130 kg.

De gebruiker moet geestelijk en lichamelijk in staat zijn om de scooter in alle mogelijke situatie te bedienen. Laat u informeren door uw vakhandelaar.

*Wanneer u twijfelt neem altijd contact op met uw arts of u in staat bent de scooter veilig te bedienen.*

**Veiligheid advies.**

**Om vallen en andere gevaarlijke situaties te vermijden, moet u eerst oefenen met uw scooter samen met een begeleider van uw leverancier.**

- Gebruik de scooter alleen als uw gezondheidstoestand dat toe staat.
- Sluit voor gebruik een voertuig verzekering af voor de scooter volgens de wettelijke aansprakelijkheid regels.
- Houd u te allen tijde aan de verkeersregels.
- Controleer voor het gebruik of alle onderdelen goed gemonteerd zijn.
- Maak u vertrouwd met de scooter op een vlakke weg.
- Maak u vertrouwd met de remwerking van de scooter
- Ga nooit rijden in extreme kou.
- De scooter is geschikt voor het vervoer van 1 persoon.
- Gebruik de scooter nooit onder invloed van alcohol of andere middelen die de lichamelijke of geestelijke toestand beïnvloeden.
- Gewichtverandering of lichaamsbewegingen kunnen de scooter instabiel maken of laten omvallen.
- Bij het nemen van hindernissen altijd oprijplaten gebruiken.
- Als u niet om een hindernis heen kunt rijden, neem de hindernis dan altijd in 90 graden.
- Bij hindernissen hoger dan 8 graden is er altijd kiep gevaar.
- Schakel de scooter nooit rijdend uit.
- Gebruik altijd de veiligheidsgordel
- Minimaal banden profiel moet 1 mm zijn
- Volg altijd de verkeersregels. Op de stoep nooit harder dan stapvoets rijden!
- Rij nooit achteruit op hellingen of ongelijke wegen.
- Zorg dat u altijd in de juiste houding zit.
- Eerst stoppen voordat u van vooruit of achteruit wilt rijden.
- Houd voeten altijd op de voetenplaat van de scooter
- Rijd in het donker of slecht weer altijd met verlichting.
- De scooter is gemaakt voor de verharde weg en normaal verkeer.

- **Draag opvallende kleding**
- **Gebruik nooit een hoge druk reiniger voor schoonmaak. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.**

**Product en levering overzicht.**


Controle van de levering.

De scooter is compleet in karton verpakt. Bewaar de verpakking voor eventuele opslag.

Controleer de inhoud:

- Om verpakking
- Scooter
- Mand
- Stoel
- Hoofdsteun
- Spiegel
- 1 set sleutels
- Gebruiksaanwijzing

## Onderdelen van de Aruba

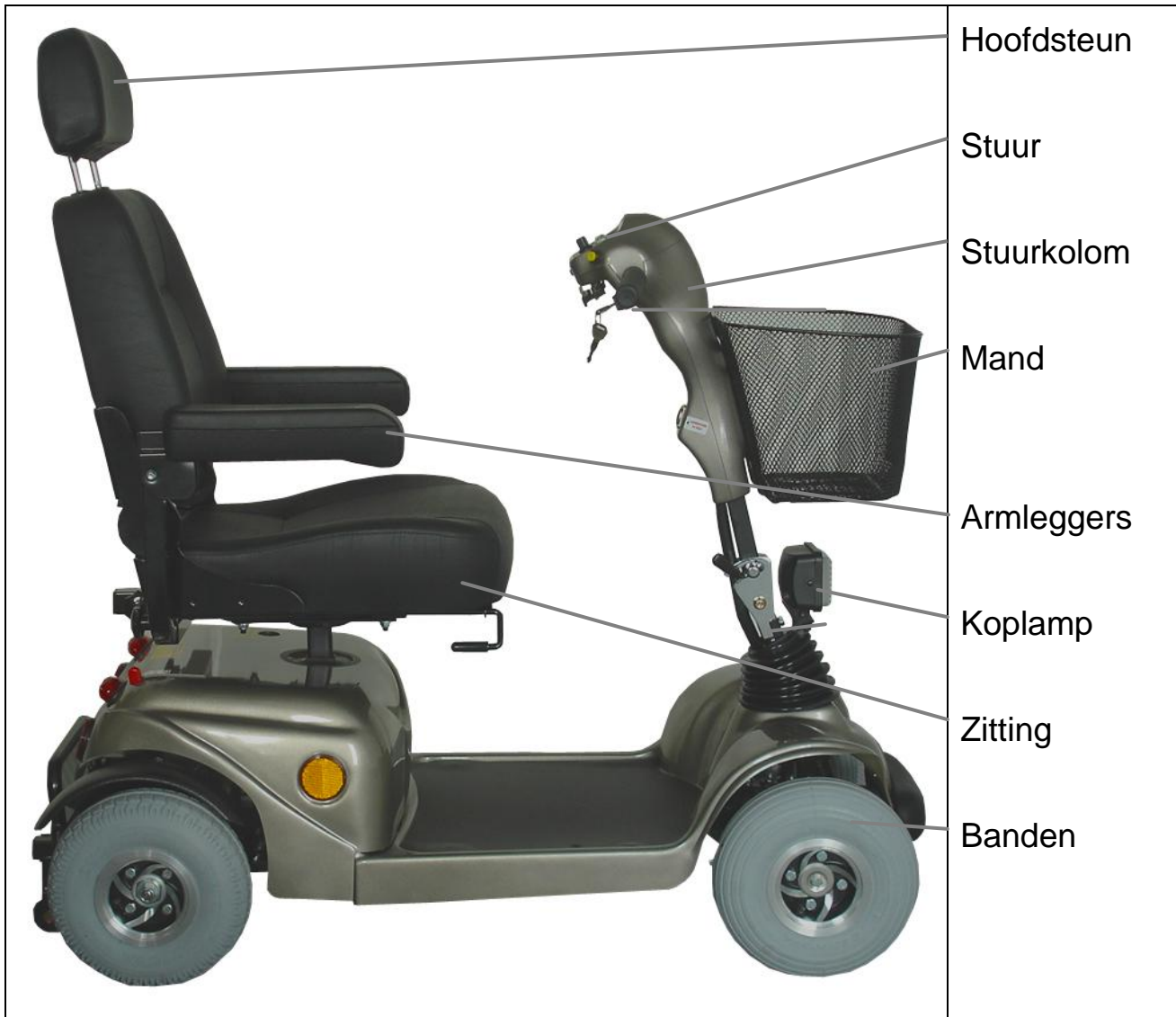

## Type aanduiding en serienummer

De sticker voor type aanduiding en serienummer bevinden zich op het frame bij de vooras



Let op!. Type aanduiding en serienummer sticker moeten op de scooter blijven zitten. Zonder sticker vervalt de garantie!

## Scooter instellen

### Stuurkolom

De stuurkolom kunt instellen om eenvoudig uit of in te stappen en om de afstand tot het stuur in te stellen.

Maak de hendel los aan de onderzijde van de stuurkolom. Verstel het stuur in de juiste positie en druk de hendel weer vast.



### Stoel verstelling

#### Hoek van de armleggers


Het is mogelijk om de hoek in te stellen van de armlegger. Draai moer ① los.

Draai de bout no ② lossier of vaster om de gewenste hoek te krijgen. Draai dan de moer ① weer vast



#### Breedte verstelling van de armleggers

U kunt de breedte van de armleggers instellen. Draai de knop ① los en schuif de armlegger in de gewenste breedte> draai de knop weer vast.

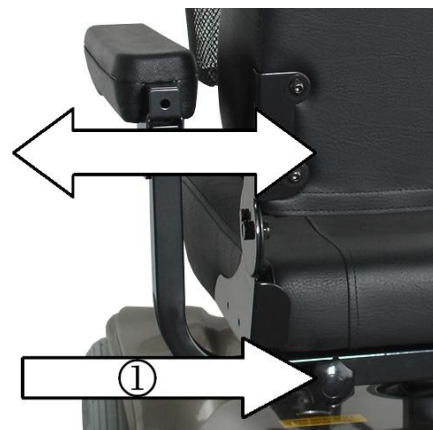

### Omhoog klappen van de armleggers

Klap de armleggers omhoog om eenvoudiger in te stappen. Zet de armlegger altijd naar beneden als u gaat rijden.



### Zitting draaien

Om het instappen te vereenvoudigen is het mogelijk om de zitting te draaien.

Trek aan de hendel onder de stoel en beweeg de stoel naar de juiste kant.

De stoel zet zich automatisch vast bij 0°, 90°, 180° en 270°.


OP 90° en / of. 270° positie kan de stoel van het frame getild worden



### Zitpositie


Om een ideale zitpositie te verkrijgen kunt u de stoel naar voren of achteren schuiven.

Trek de hendel omhoog onder de stoel en schuif de stoel in de juiste positie.

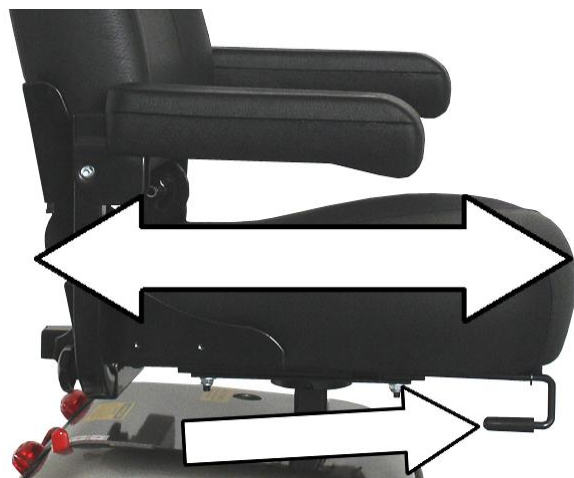


## Zithoogte

De zitting kan in hoogte versteld worden. Neem eerst de zitting af. Neem de afdekplaat af door hem eenvoudig omhoog te trekken ①. En maak de kabel verbinding los

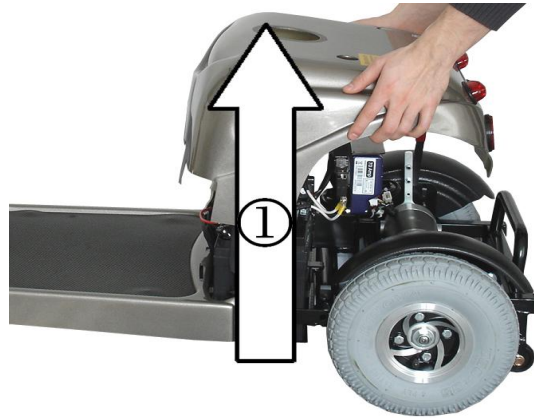

Draai de bout los aan de zitting mast ②. Stel de mast op de gewenste hoogte. En draai de bout weer vast

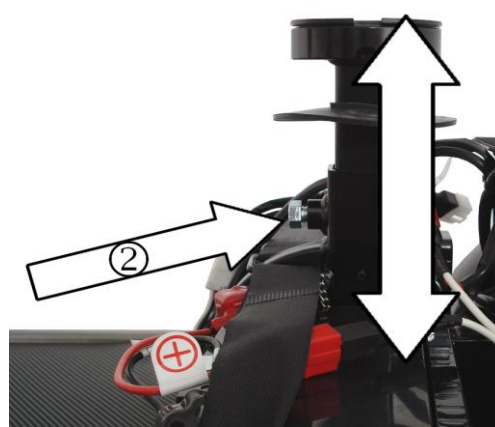

## Rugleuning omklappen

Om plaats te besparen kunt u de rugleuning eenvoudig naar voren klappen




## Hoofdsteun

De hoofdsteun kan in hoogte versteld worden. Druk de knop in aan de voorzijde onder de hoofdsteun en druk of trek de hoofdsteun in de gewenste hoogte.



## Dashboard

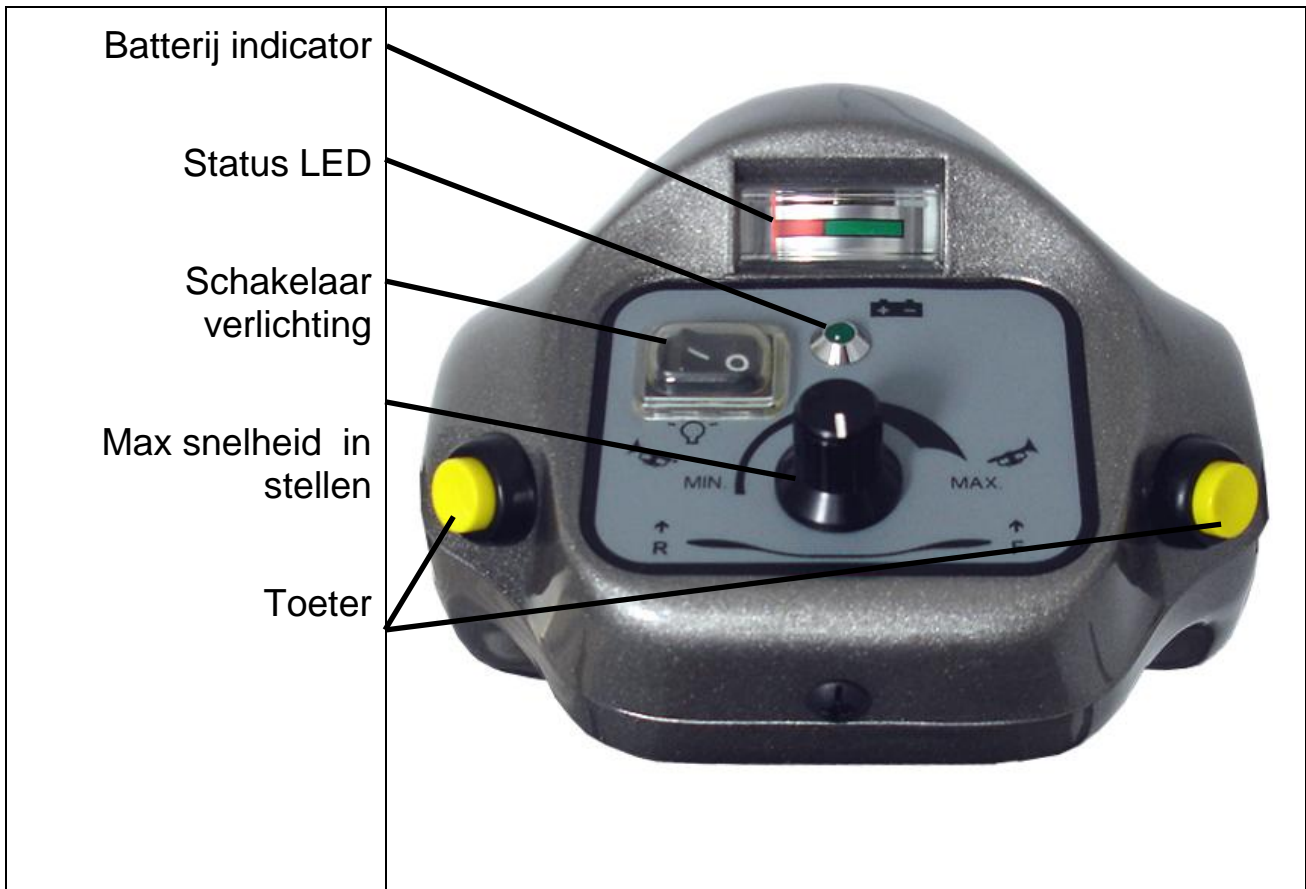

### Functie van LED en verlichting



### Toeter



### Tempomatik

Met deze knop kunt u de top snelheid traploos instellen. Draai de knop naar links om langzamer te gaan. Draai de knop naar rechts om sneller te rijden.



### Batterij meter

Met de batterij meter kunt u zien in welke staat uw batterijen zich bevinden.

Zijn de batterijen volledig geladen dan staat de meter helemaal naar rechts in het groen.

Tijdens het gebruik zal de meter zich naar rechts bewegen. Wanneer de meter in het rode gebied komt moet u de batterijen direct opladen.

Wanneer de meter geheel links staat. Direct stoppen en de scooter opladen. U brengt schade toe aan de batterijen als u verder rijdt.




### Status LED

Wanneer de scooter is ingeschakeld brand de LED.



## Slot

U schakelt de scooter in door de sleutel een kwartslag te draaien.

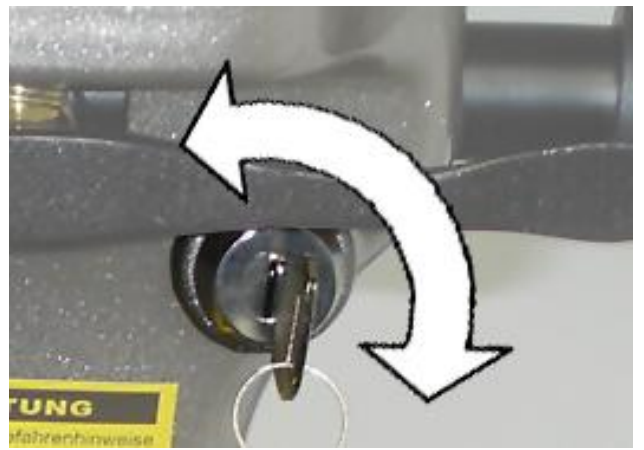

## Vrijloop van de scooter

Wanneer u de scooter wilt duwen moet u de vrijloop hendel om zetten. Als deze hendel om staat kunt u de scooter duwen. De scooter heeft geen remmend vermogen als deze hendel om staat.

Wanneer de hendel naar beneden staat is de magnetische rem in geschakeld. Druk de hendel naar voren om de rem te ontkoppelen.

De scooter heeft nu geen motor en remvermogen.

Om deze weer in te schakelen druk de hendel weer naar achteren



**LET OP!** Schakel nooit de vrijloop in op hellingen of als iemand zich op de scooter zich bevindt.

## Hoofdzekering

De hoofdzekering bevindt zich onder de stoel. Bij overbelasting schakelt de scooter automatisch af.

Om de scooter weer te activeren: druk de zekering weer terug.

Wanneer de scooter niet meer geactiveerd wordt neemt u contact op met uw dealer



## Rijden met de scooter

### Parkeren

Wanneer u de scooter moet parkeren. Zet de scooter uit met de sleutel en neem deze mee. De scooter blijft automatisch op de rem staan

### Rijden

Stel de stoel en de stuurkolom in de juiste zitpositie.


Stel de snelheid in op de laagste stand. Maak u bekend met de rij eigenschappen van de scooter. Wanneer u deze kent mag u de snelheid hoger zetten.

Oefen vooruit en achteruit rijden op een veilige plek waar u niemand kunt aanrijden. Doe dit onder begeleiding van een persoon.


Om naar voren te rijden, drukt u de rechter hendel naar voren.

Hoe verder u indrukt hoe harder de scooter gaat rijden.

De maximale snelheid stelt u in met de tempomat

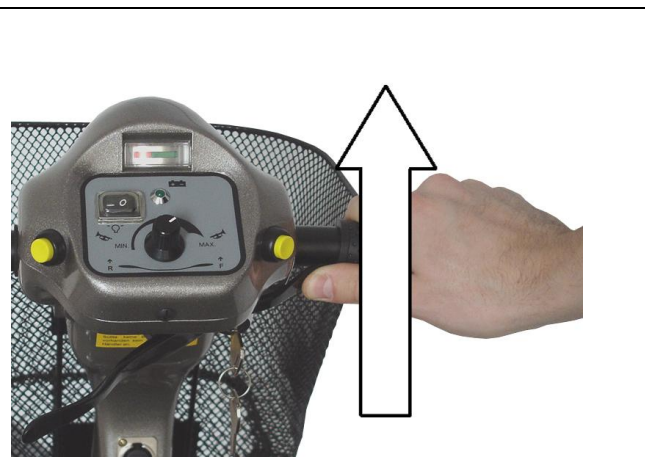

Om achteruit te rijden drukt u de linker hendel naar voren. Doe dit altijd op de laagste snelheid.

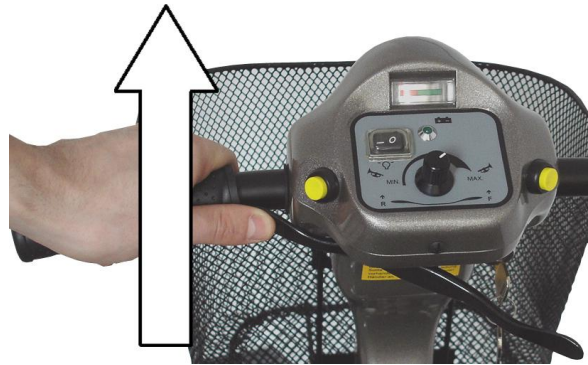

Sturen is eenvoudig en logisch. Draai het stuur in de gewenste richting waar u heen wilt rijden. Houd altijd voldoende afstand en rijd alleen op de verharde weg.

Rijd nooit te dicht langs de wegkant, voorkom dit ten alle tijden



## Remmen

Wanneer u de gashendel los laat, remt de scooter automatisch.



Let op!. U kunt met uw scooter berg op en af rijden. Houd er rekening mee dat de maximale veilige hoek 8° is.

Rijd altijd op de verharde weg. Houd er rekening mee dat bij nat weer banden kunnen weg glijden

De stabiliteit van de scooter hangt met verschillende factoren samen:

- (a) uw lichaams grote;
- (b) de hoek van de rugleuning;
- (c) uw gewicht;
- (d) hoe ver de zitting naar achteren geschoven is
- (e) de hoek en de hoogte van de hindernis die u wilt nemen.

Wanneer u niet zeker bent of de hindernis veilig is, denk dan veiligheid eerst.

## Batterijen.

Uw scootmobiel wordt standaard uitgeleverd met 2 gas dichte batterijen (gel). Deze batterijen zijn onderhoudsvrij. Deze batterijen zijn gesloten.

### Opladen van de batterijen

De oplader die meegeleverd is met de scooter mag alleen gebruikt worden op de Aruba scootmobiel in combinatie met de standaard geleverde batterijen.

Gebruik nooit een ander oplaad apparaat. Dit kan leiden tot garantie verlies.

Lees de gebruiksaanwijzing van de oplader.

U kunt de batterijen opladen na elke rit. U kunt de staat van uw batterijen aflezen op de indicator op het dashboard.

Het opladen van lege batterijen kan tot 8 uur duren.

Onderbreek het opladen nooit, dat verkort de levensduur van de batterijen.

Het volledig leeg rijden van de batterijen verkort ook de levensduur van de batterijen.

Controleer de oplader of deze op 230 volt staat<sup>①</sup>.

Verbind de oplader met de scootmobiel<sup>②</sup> en steek de stekker in het stopcontact.



Schakel de oplader aan<sup>③</sup>.


De linker LED moet nu rood oplichten<sup>④</sup>.

Brand de rechter LED niet <sup>⑤</sup> dan is de oplader niet goed met de scooter verbonden.



Brand de rechter LED<sup>⑤</sup> geel, dan wordt de scooter opgeladen

Brand de rechter LED<sup>⑤</sup> groen, dan is het laden klaar

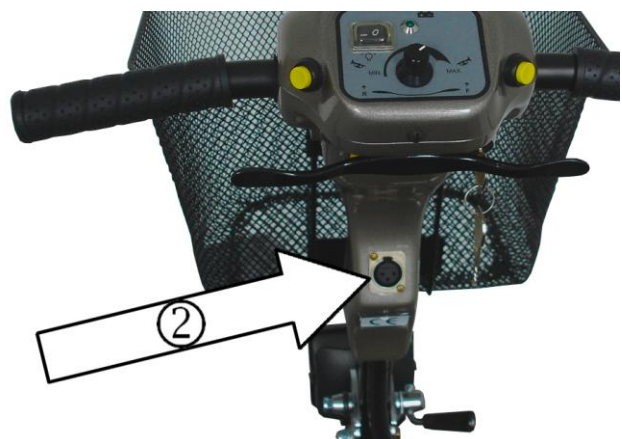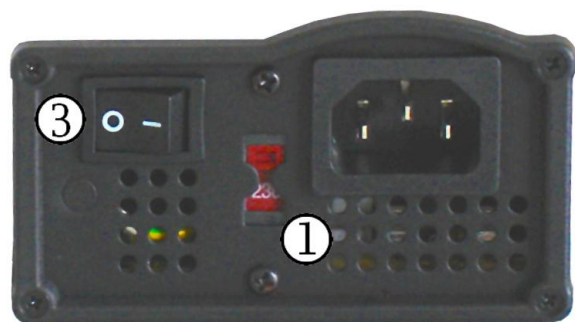


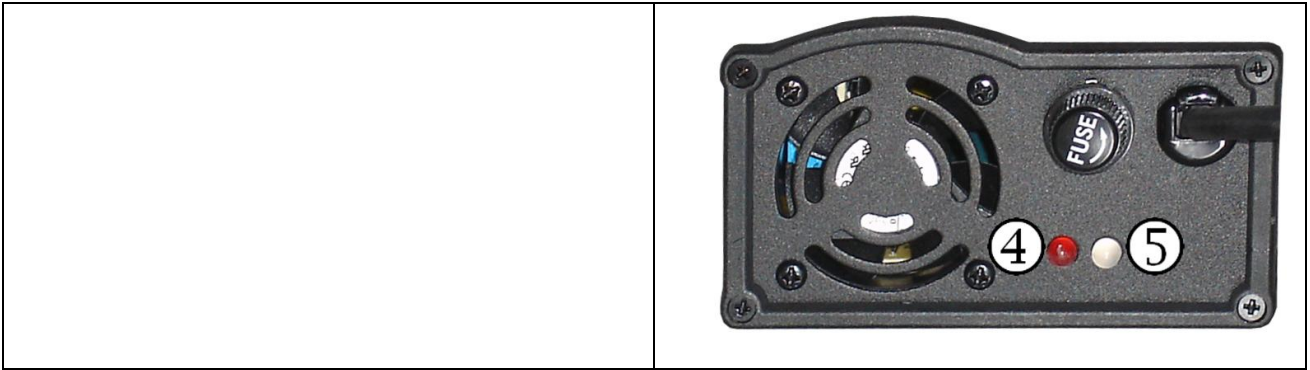

Schakel de oplader uit en verwijder alle aansluitingen  
**Vervangen / verwijderen van de batterijen.**

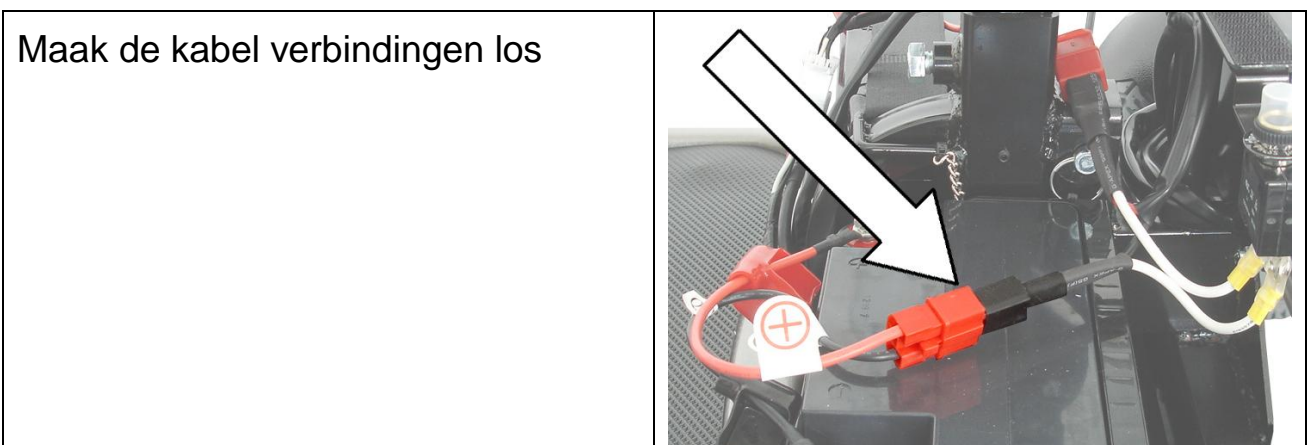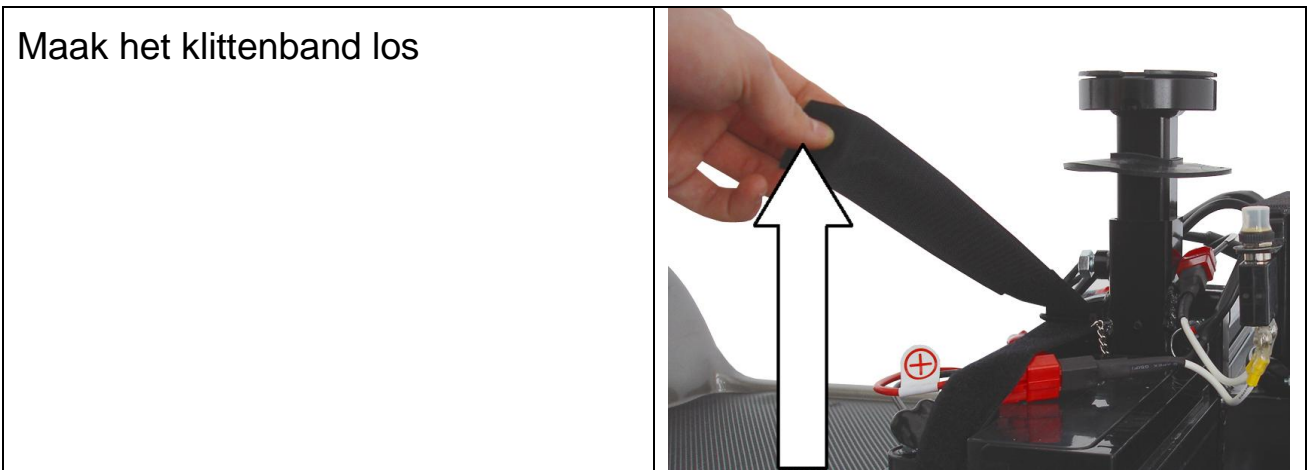

Schuif de hoesjes van de contact bouten. Draai de bouten los. U kunt de batterijen uit nemen.

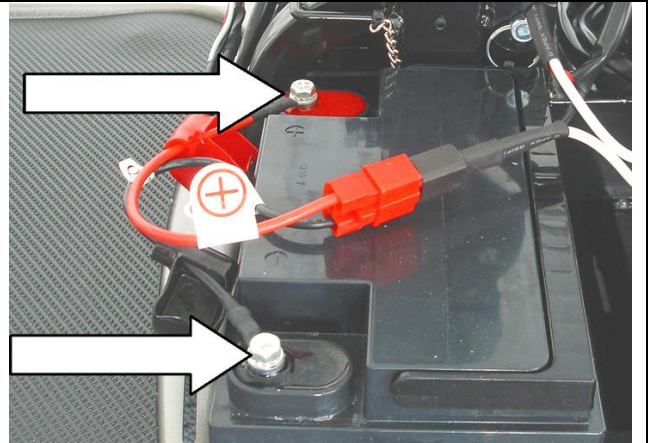

Het plaatsen van de batterijen doet u in omgekeerde volgorde.

Let op ! Monteer de polen altijd juist. Negatief ( zwart) op negatief en positief (rood) op positief

### Transport van de Scooters

U kunt de scooter in onderdelen vervoeren in de auto. Of rijd hem met oprijplaten in de laadruimte.



Let op! Er kan olie of vuil aan de scooter zitten. Zorg voor de juiste bescherming van uw auto en kleding

## Reinigen van de scooter

### Reinigung

- Het frame kunt u afnemen met een vochtige doek. Eventueel met een zacht schoonmaakmiddel.
- De velgen kunt u schoonmaken met een kunststof borstel
- De bekleding kunt u schoon maken met lauw water en een mild schoonmaakmiddel.



Gebruik nooit een hoge druk reiniger of stoom reiniger!

### Controle door de gebruiker

Controleer bij elke rit

- Controleer banden op spanning en schade. Banden met minder dan 1 mm profiel moeten worden vervangen
- Controleer de werking van de rem.
- Controleer de algemene conditie van de bekleding.
- Controleer op schade aan alle bewegende delen en of deze goed functioneren
- Controleer alle verbindingen van bouten, moeren en aansluitingen.

## Foutmelding

Met blinken van de service LED kunt u eventuele storingen op zoeken

De LED brand bij een storing. Hoeveel keer de Led knippert daaruit kunt een storing op zoeken:

Zie onderstaande lijst met fout meldingen

<b>Fout Code</b>	<b>Wat doet de scooter</b>	<b>Omschrijving</b>
1 Akku bijna leeg	Rijd normaal	Laad zo snel mogelijk op
2 Akku leeg	Rijd niet	Om verder te rijden laad de scooter op
3 Spanning van de batterijen zijn te hoog	Rijd niet	Verwijder de oplader en schakel de scooter aan en uit. Blijft de fout neem contact op met uw dealer
4 Stroom time out	Rijd niet	Het systeem heeft te veel stroom binnen gekregen. Schakel de scooter uit / aan. Fout moet nu weg zijn, anders contact opnemen met de dealer
5 Fout in remsysteem	Rijd niet	Controleer de handrem, controleer kabel verbindingen, controleer de vrijloop. Geen resultaat bel uw dealer!
6 De vrijloop hendel staat verkeerd	Rijd niet	De vrijloop hendel stond verkeerd bij het aan zetten van de scooter. Zet de scooter uit. Zet de hendel goed en zet de scooter weer aan.
7 Fout in de aansluitingen of kabels	Rijd niet	De board computer of de bekabeling is beschadigd. Bel uw dealer
8 Fout in de aandrijving	Rijd niet	De motor of de bekabeling is beschadigd. Bel uw dealer
9 Andere fouten	Rijd niet	Onbekende fout! Bel uw dealer!

## Onderhoud aanwijzing voor de dealer

Laat uw scootmobiel 1 x per jaar volledig controleren . Bij storingen of defecten altijd contact opnemen met uw vakhandelaar



U kunt als dealer altijd bellen voor technische ondersteuning

Dietz Kundenservice +49 (0) 7248/ 9186 - 0



Volg het onderhouds protocol

## Verwijdering

**Neem contact met uw lokale overheid wat de voorschriften zijn**

## Technische Gegevens

Artikel-Nr.	100137
Kleur	Champagne
Snelheid km/h	6
Draaicirkel cm	285
Max. hellingshoek	8%
Actieradius km	ca. 30
Maten en gewichten	
Zitbreedte cm	45
Zithoogte cm	58
Zitdiepte cm	46
Totale breedte cm	60
Totale lengte cm	117
Totale hoogte cm	119
Rugleuning cm	47
Leeg gewicht kg	78
Max. belastbaarheid kg	130
Banden	
Achter wielen	2,5x10, 4bar
Voor wielen	2,5x10, 3,5bar
Elektrik	
Motor vermogen	250 Watt
Besturing	Dynamic – Rhino Scooter Controller
Batterijen	2x12/36 Gel Batterijen
Laad tijd	6 – 12 uur
Oplader	Freerider 24V Battery Charger PL90-0204

## Onderhouds protocol

(Verwenden Sie nach Möglichkeit die am Seitenende angegebenen Wartungskürzel beim Ausfüllen der Spalte)

Wanneer												
Wat												
Reflektoren seitlich												
Reflektoren hinten												
Trommelrem												
Insassenbremshebel												
Begleiterbremshebel												
Schiebegriffe												
Seitenteil, komplett												
Sitzbespannung												
Rückenbespannung												
Vorder-/ Lenkräder												
Hinter-/ Antriebsräder												
Reifendruck (bei Luftbereifung)												
Reifendecke												
Greifreifen												
Rahmen, allgemein												
Wer												

G = getest    E = vervangen    R = reparatie

## Garantie

Garantie heeft betrekking op alle onderdelen die kapot kunnen gaan, die aanwijsbaar zijn terug te voeren op materiaal- en of fabricage fouten. De garantie geldt voor 24 maanden na uitlevering door ons aan de dealer. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen die normaal slijten door gebruik, of door slecht onderhoud of door de gebruiker veroorzaakte beschadigingen. Het garantie verlies geldt ook voor verkeerd onderhoud, zoals verkeerde olie of schoonmaakmiddelen.

Batterijen en oplader hebben een garantie van maximaal 6 maanden.

Garantie geldt alleen met het onder staande bewijs ingevuld. Aankoopbon en onderhoud historie



### Garantie-bewijs

Produkt:

Model

Seriennummer

Vakhandelaar:

Datum en Stempel

Senden an:

**DIETZ**<sup>®</sup>  
**REHA-PRODUKTE**

Descostrasse 10  
D-76307 Karlsbad-Ittersbach