



Evacuatie hulpmiddelen

Ondersteuning door techniek,
functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Evacuatie hulpmiddelen

Het Evacuatie doek geeft een krachtige ondersteuning en kan gebruikt worden door 1 persoon om patiënten snel uit een gevaarlijke situatie te transporteren.

Zelfs trappen kunnen worden gebruikt zonder moeilijkheden.



Eenvoudig en licht in gebruik.

Het evacuatie doek wordt gebruikt om niet ambulante patiënten veel en snel direct vanuit hun bed te transporteren.

Er is slechts 1 persoon nodig voor een veilige en snelle evacuatie.

Het sterke materiaal maakt het mogelijk om de patiënt te verplaatsen over alle soorten terrein met weinig inspanning.

Het slimme design van het Evacuatie doek is snel en eenvoudig te gebruiken bij een noodgeval.

Het Evacuatie doek ligt permanent onder het matras en wordt vast gezet met elastisch hoek lussen.

Het heeft geen invloed op het opmaken van het bed

Onmiddellijk klaar voor gebruik.

De 2 zijflappen zijn geïntegreerd in de zijkanten. En hebben Velcro snelsluitingen. En worden opgeborgen in een vakje aan de zijkant van het doek.

Bij een noodgeval trek de de zijflappen uit de tasjes onder het matras..

Vast zetten en transport

De flappen worden over de patiënt geplaatst en vast gezet met Velcro.

Dit geeft de matras een U vorm, dit geeft de patiënt stabiliteit.

De matras kan nu weggesleept worden met de rode hengsels





Redding van de patiënt uit de kamer.



Technische specificatie.

Maat: 2010 x 850 mm
Max gebruikers gewicht: 110 kg
(wanneer gebruikt als stretcher of reddingsdeken)
Materiaal: Polyamide/
nylon-6-weave
ademend materiaal
Wasbaar: tot 60° C
Droger: mogelijk
(delicaat programma)

Trap evacuatie

t

 **ReACTIEF**
zorghulpmiddelen bv